





## Cómo emparejar los audífonos Kirkland Signature 10.0 con bobina inductiva al teléfono móvil


- 1 Descárguese e instale la aplicación Easy Line Remote™ desde Google Play™ o App Store®.

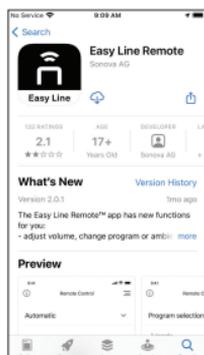

- 2 Abra la aplicación y reinicie los audífonos.

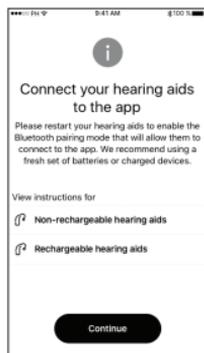


- 3 Seleccione sus audífonos.

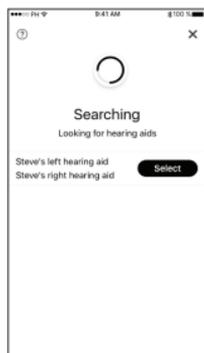

- 4 Póngase en contacto con el personal del centro de audífonos (HACS) y programe una hora para una cita de Remote Support.

# Cómo iniciar una sesión de Remote Support

5 Para iniciar Remote Support, pulse sobre las 3 líneas situadas en la parte superior derecha.

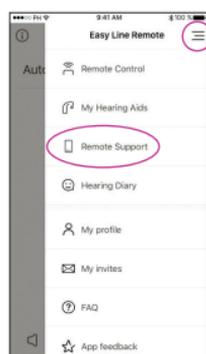

6 Toque “Remote Support”.

7 Toque “Start” (Iniciar) para empezar a buscar personal del centro de audífonos (HACS).



*NOTA: Ya debe disponer de una hora para una cita programada con el audioprotesista. El audioprotesista solo estará disponible si tiene una cita ya programada. Tenga paciencia mientras se conecta.*

8 Hable mediante videollamada con el personal del centro de audífonos (HACS).

